

AUFTRAGGEBER:

ÜBERDRUCK FUNKTIONSPRÜFUNG GEHÖRSCHUTZ

AUDIA

KOMMISSION:

AUFTRAGS-NR. (AUDIA):

LIEFERSCHEIN-DATUM:

GEHÖRSCHUTZ

TYP/BEZEICHNUNG:

MODEL DRUCKPRÜFGERÄT:

HERSTELLER:

AUDIA AKUSTIK GMBH | Franz-Mehring-Strasse 13 | 99610 Sömmerda | Germany

ÜBERDRUCK FUNKTIONSPRÜFUNG

Die Druckprüfung mittels Dichtigkeitsprüfgerät zum Nachweis der korrekten Abdichtung der Gehörschutzotoplastik wird durch einen Hörakustiker oder entsprechend audiologisch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt und ist für beide Ohren separat auszuführen.

1. Filterelement aus der Gehörschutzotoplastik entfernen.
2. Der flexible Luftschlauch wird knickfrei über die beiliegenden Adapter mit der Gehörschutzotoplastik verbunden.
3. Nachdem die Gehörschutzotoplastik in den Gehörgang eingesetzt wurde, wird bei Start ein Überdruck im Restvolumen erzeugt. Je nach Prüfsystem (Druckaufbau/Druckerhalt) ist der in der Gebrauchsanleitung beschriebene Ablauf zu beachten.
4. Das Display des Messgerätes informiert über das Ergebnis.
5. Anschließend muss der Filter wieder eingesetzt werden.

Ist das Ergebnis negativ, ist die Platzierung der Otoplastik im Gehörgang zu prüfen, zu korrigieren und anschließend zu wiederholen. Bei erneuter Undichtigkeit ist die Firma AUDIA AKUSTIK GMBH unverzüglich zu informieren, um in Abstimmung eine Nachbesserung oder Neufertigung einzuleiten. Gehörschutz der die Funktionsprüfung nicht besteht, darf nicht in Verkehr gebracht werden, dieser muss daher zum Hersteller zurück oder vernichtet werden.

OHR	DRUCKPRÜFUNG BESTANDEN	FUNKTIONSPRÜFUNG BESTANDEN
links	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein <small>(gemäß Ausgabe des Dichtigkeitsprüfgerätes)</small>
rechts	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	

PRODUKTEINWEISUNG

- Gründliche Einweisung zur Handhabung sowie Hinweis zur Gebrauchsanweisung.
- Passgenauigkeit, Tragekomfort und sicherer Halt wurden überprüft.
- Das korrekte Einsetzen und Entnehmen des Gehörschutzes wurde vorgeführt.
- Hinweise zur regelmäßigen Pflege, sowie Aufbewahrung bei Nichtbenutzung.
- Aufklärung der Folgen bei Nichttragen des Gehörschutzes, auch bei kurzzeitiger Unterbrechung, ist erfolgt.
- Auf weitere Gefahren wurde hingewiesen.
- Hinweis zur nächsten Funktionsprüfung nach drei Jahren (liegt in Verantwortung des Nutzers).

KONTROLLE UND EINWEISUNG ERFOLGT

VOR- / NACH-
NAME PRÜFER: _____

DATUM / UNTER-
SCHRIFT PRÜFER: _____

EMPFANGSBESTÄTIGUNG KUNDE

DATUM / UNTER-
SCHRIFT KUNDE: _____

ACHTUNG: Die Funktionsprüfung ist für alle nach DIN EN 352 zugelassenen Produkte vorgeschrieben und gemäß Herstellervorgaben durchzuführen. Das Ergebnis der Funktionsprüfung ist in schriftlicher Form an den Hersteller (AUDIA) zu übermitteln. Erst dann erfüllt das Produkt die Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung.